

Gebrauchsanweisung

Die We Design b.v. hat ihren Sitz in 6814 EN Arnheim, Niederlande, Brouwerijweg 112. Die Orthesen von We Design sind für den alltäglichen Gebrauch bestimmt. Orthesen sind eine externe Gelenkstütze (konservative Behandlung), die Ruhe und Stabilität verleiht. Hierdurch wird die Motorik gefördert und können alltägliche Aufgaben besser erledigt werden. Die Orthesen von We Design wurden in den vergangenen Jahrzehnten mit viel Freude getragen und bieten vielen Patienten Erleichterung bei ihren täglichen Aktivitäten.

Risiken beim Tragen von Orthesen:



Aufbau: Wenn Sie eine Orthese bekommen, müssen Sie sich zunächst daran gewöhnen. Deshalb sollten Sie die Tragedauer allmählich verlängern. Tragen Sie die Orthese nicht gleich den ganzen Tag. Es ist normal, dass eine kleine Druckstelle auf der Haut entstehen kann. Diese muss eine halbe Stunde nach dem Ablegen der Orthese verschwunden sein.

Schmerzen und/oder Druckstellen: Zu Beginn kann es vorkommen, dass durch das Tragen der Orthese in Kombination mit den täglichen Arbeiten schmerzhaft Druckstellen entstehen. Wir empfehlen, Ihre Orthese abzulegen und für eine Anpassung Kontakt zu Ihrem Orthopädiemechaniker aufzunehmen.

Taubheit: Wenn Sie ein „taubes“ Gefühl bekommen, kann es sein, dass die Orthese auf einen Nerv drückt. Wir empfehlen, Ihre Orthese abzulegen und für eine Anpassung Kontakt zu Ihrem Orthopädiemechaniker aufzunehmen. Die Stelle, an der der Nerv gereizt wird, muss frei liegen. Das Gefühl kommt nach dem Ablegen der Orthese von selbst zurück. Dies hängt davon ab, wie lange Sie die Orthese trotz des Taubheitsgefühls getragen haben. Das kann eine Woche oder länger dauern. Befolgen Sie dann die Empfehlung und nehmen Sie die Orthese sofort ab.

Anatomische Veränderungen: Tragen Sie Ihre Orthese und wird diese im Laufe des Tages immer enger, dann nehmen Sie die Orthese mithilfe von Seife oder Handcreme ab. Kühlen Sie Ihre Hände mit Wasser. Es ist möglich, dass durch Anstrengung oder Temperaturschwankungen anatomische Veränderungen auftreten. Nach einer Ruhepause können Sie die Orthese wieder anlegen. Wenn die Umfangsveränderung Ihrer Finger anhält, sollten Sie Kontakt zu Ihrem Orthopädiemechaniker aufnehmen. Dieser kann gemeinsam mit Ihnen nach einer Lösung suchen.

Veränderungen: Im Laufe der Zeit können sich Ihre Gelenke verändern, sodass die Orthese nicht mehr angenehm sitzt und ihre ursprüngliche Funktion verliert. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu Ihrem Orthopädiemechaniker auf.

Fahrtüchtigkeit: Das Tragen einer Orthese kann einer Person einen festeren Griff verleihen, während sich bei einer anderen der Griff verringert. Dies kann sich auf Ihre Fahrtüchtigkeit und damit auf Ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer auswirken.

Arbeiten, wie Heimwerken, und andere Arbeiten, bei denen Sie Gegenstände fest in der Hand halten müssen: We Design empfiehlt die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Dabei müssen Sie selbst beurteilen, ob Sie mit der Orthese einen festeren Griff haben oder ob Sie die Orthese bei diesen Arbeiten besser abnehmen sollten.

Ketten und/oder Bändern an den Orthesen: In einigen Fällen ist eine Kette oder ein Band um die Orthese wichtig, um diese an der richtigen Stelle zu halten. Sie müssen dann während Ihrer alltäglichen Arbeiten zusätzlich darauf achten, dass die Bänder und/oder Ketten nirgendwo hängen bleiben.

Verschlüsse und Scharniere an den Orthesen: In einigen Fällen können ein Verschluss und ein Scharnier angebracht werden müssen. Sie müssen dann während Ihrer alltäglichen Arbeiten zusätzlich darauf achten, dass die Verschlüsse und/oder Scharniere nirgendwo hängen bleiben.

Hitze: Silber kann warm werden, achten Sie deshalb auf extreme Hitze. Seien Sie vorsichtig bei Kaminöfen, Backöfen und/oder allen anderen Wärmequellen. Nehmen Sie die Orthese sofort ab.

Drehende oder bewegende Teile: Wenn Sie sich in der Nähe von drehenden oder bewegenden Teilen aufhalten, legen Sie die Orthese ab. Hierdurch vermeiden Sie, dass die Orthese sich verklemmt und Schäden und/oder Verletzungen verursachen kann. Beachten Sie auch jederzeit die Sicherheitsvorschriften der Maschinen, mit denen Sie arbeiten.

Kratzer: Silber ist ein Metall und kann Kratzer auf weichen Oberflächen verursachen. Seien Sie vorsichtig bei Tischen mit Glasplatte. Das Silber kann Kratzer verursachen.

Allergie

Silberallergie: Sie wissen häufig, dass Sie eine Silberallergie haben und deshalb werden Sie sich nicht für eine Orthese von We Design entscheiden. Sollten Sie beim Tragen einer Orthese von We Design feststellen, dass Sie eine Silberallergie haben, nehmen Sie die Orthese sofort ab.

Wie können Sie feststellen, ob eine allergische Reaktion vorliegt? Bei einer Allergie werden beim Tragen der Orthese sofort Hautreizungen und -rötungen auftreten. Es kann auch zu Juckreiz kommen. We Design hat diesbezüglich mit

Gebrauchsanweisung

dem Orthopädiemechaniker sehr gute Vereinbarungen getroffen. Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Kupferallergie: Das Silber von We Design enthält eine geringe Menge Kupfer, nämlich 75/1000.

Zinkallergie: Bei Orthesen mit Lötstellen wird beim Löten eine geringe Menge Zink verwendet. Hiermit werden die beiden Silberteile miteinander verbunden.

Meldung

Bei Fragen und/oder Reklamationen müssen Sie sich an Ihren Orthopädiemechaniker wenden. Dieser wird sich dann mit We Design in Verbindung setzen und wir werden Ihren Fall gemeinsam bearbeiten.

Verantwortung

Folgen beim Tragen von Orthesen: We Design übernimmt keine Verantwortung für die Wahl der Orthese und kann deshalb nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche Verletzungen aufgrund des Gebrauchs der gelieferten Orthesen. We Design übernimmt deshalb keine Haftung für die Folgen des Tragens einer Orthese.

Lebensdauer der Orthesen von We Design

Silber ist ein langlebiges Edelmetall. Dies bedeutet, dass die Orthesen von We Design aus diesem Grund eine längere Lebensdauer haben können. Orthesen sind allerdings ein Gebrauchsgegenstand mit einem medizinischen Zweck. Orthesen sind für den alltäglichen Gebrauch bestimmt. Orthesen üben Druck aus, um die erforderliche Unterstützung zu bieten. Hierdurch kann es zu Abnutzung kommen. Diese hängt vor allem von der Intensität und den Arbeiten ab, bei denen die Orthesen getragen werden. Weil die Orthese während des Gebrauchs regelmäßig gebogen wird, wird das Silber hart und kann brechen.

Garantie

Garantie We Design: We Design hat ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei der Industrie- und Handelskammer hinterlegt. We Design gibt eine Garantie auf alle ihre Orthesen. Die betreffenden Garantiebestimmungen sind ihren Kunden bekannt. We Design sorgt - innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens - zusammen mit Ihrem Behandler dafür, dass Sie ein angemessenes medizinisches Hilfsmittel für Ihre Beschwerden erhalten. Die Geschäftsführung von We Design dankt Ihnen für Ihr Vertrauen. Täglich arbeitet unser Team mit viel Freude, Wissen und Expertise daran, Ihnen funktionale und attraktive Orthesen zur Verfügung zu stellen. Alle in unserem Unternehmen tragen zu unserem guten Service bei.

Nachbildung und Original

Die Orthesen von We Design sind je nach Modell urheber-, design- und/oder patentrechtlich geschützt und dürfen nicht nachgemacht werden.